


# TuBo-Guard

Beißschutz | Beißschutz mit zweiteiligem Fixierband für Endotrachealtuben

TuBo-Guard ist ein schonender Beißschutz für Erwachsene, Jugendliche und Schulkinder. Er wird mit dem Tubus fest verbunden und nimmt daher im Mund des Patienten einen geringen Platz ein. Dieser Beißschutz übt keinen Druck auf die Zunge aus und schont die Zähne sowie den gesamten Mundraum des Patienten.

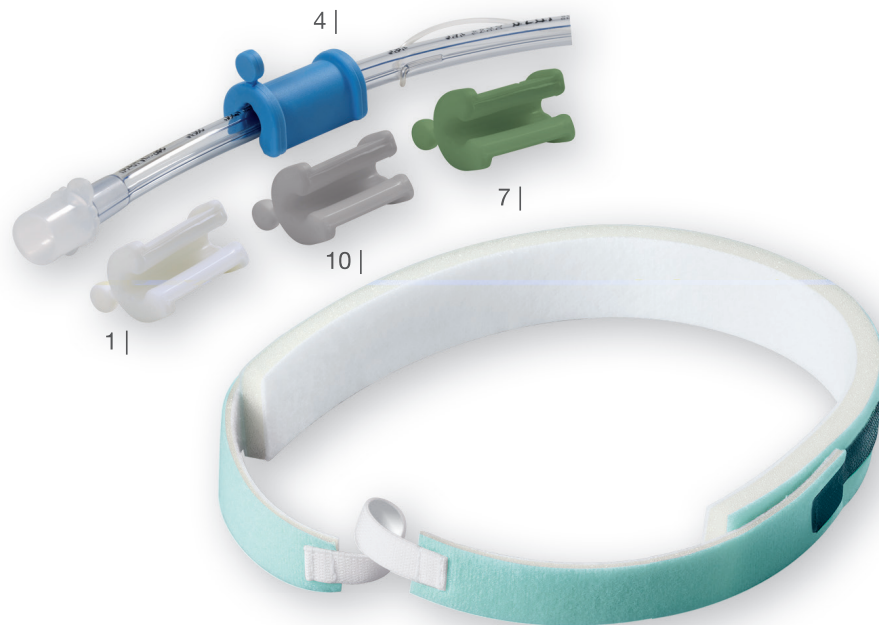

Der Beißschutz TuBo-Guard wird in vier Durchmessern und als Set mit dem zweiteiligen Fixierband TuBo-Grip angeboten:

	Tubusgröße	VE	REF
1   TuBo-Guard weiß	ca. ID 7.0	20 St	20-59-7
2   TuBo-Guard Set weiß	ca. ID 7.0	16 St	20-50-7
3   TuBo-Guard Set weiß XL	ca. ID 7.0	16 St	20-51-7
4   TuBo-Guard blau	ca. ID 7.5	20 St	20-59-75
5   TuBo-Guard Set blau	ca. ID 7.5	16 St	20-50-75
6   TuBo-Guard Set blau XL	ca. ID 7.5	16 St	20-51-75
7   TuBo-Guard grün	ca. ID 8.0 + ID 8.5	20 St	20-59-8
8   TuBo-Guard Set grün	ca. ID 8.0 + ID 8.5	16 St	20-50-8
9   TuBo-Guard Set grün XL	ca. ID 8.0 + ID 8.5	16 St	20-51-8
10   TuBo-Guard grau	ca. ID 9.0 + ID 9.5	20 St	20-59-9
11   TuBo-Guard Set grau	ca. ID 9.0 + ID 9.5	16 St	20-50-9
12   TuBo-Guard Set grau XL	ca. ID 9.0 + ID 9.5	16 St	20-51-9
13   TuBo-Guard Set Mix XL	4 Sets je Größe	1   16 St	20-51-X



Die ID-Werte sind ca.-Angaben, da der Außendurchmesser des Tubus je nach Hersteller variiert. Bitte testen Sie den Halt des Beißschutzes vor Anwendung am Patienten oder fragen Sie bei uns nach. Wir beraten Sie gerne.

Bitte prüfen Sie den Beißschutz bei jeder Mundpflege auf Verschleißspuren und tauschen Sie ihn rechtzeitig aus.

Bei den Sets stehen zwei Nackenpolsterlängen zur Verfügung. Bei Verschmutzung wird nur das Mittelteil ausgetauscht, das Nackenpolster kann längere Zeit am Patienten verbleiben. Das Fixierband kann auch separat bezogen werden.

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an.



its-novo.de

# GEBRAUCHSANWEISUNG TuBo-Guard Set

ITSNOVO®




1 | Beim Wechsel der Fixierung: Reinigen Sie den Tubus. Kalkulieren Sie eine kurze Ablüftezeit ein oder trocknen Sie den Tubus.



2 | Klicken Sie den Beißschutz TuBo-Guard seitlich um den Tubus, so dass eine Hälfte im Mund des Patienten liegt.



3 | Legen Sie das TuBo-Grip Nackenpolster hinter den Kopf des Patienten, so dass ein Ende über dem Ohr, das andere Ende unter dem anderen Ohr endet.

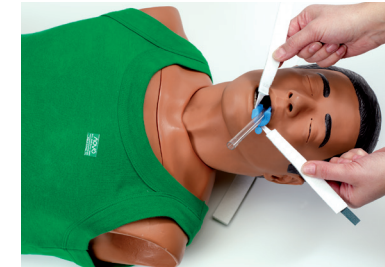

4 | Platzieren Sie das Gummiband mit der Silikonseite mittig, von unten auf dem Beißschutz.



5 | Kreuzen Sie die Bandenden unter Zug 1 x um den Beißschutz. Sie haben genug Zug auf das Gummiband gebracht, wenn es den Beißschutz komplett umfasst.



6 | Befestigen Sie die Enden des Mittelteils unter Zug mit den Klettstreifen auf dem Nackenpolster.  
Fertig angelegte Fixierung.